



**Innocid® ID-i 71** Dezinfectant pentru instrumente **FINISH**

Dezinfectant pentru instrumente gata de utilizare

**Innocid®**

www.Innocid.com



- Gata de utilizat – eficient și comod
- Spectru larg de activitate, inclusiv efect virucid
- Protecție împotriva coroziunii
- Aprobat de Karl Storz - Endoscoape
- ID-i 71 este bactericid, fungicid, tuberculocid și virucid.

### Când să folosiți Innocid ID-i 71?

Folosiți Innocid ID-i 71 Dezinfectant pentru instrumente **FINISH** pentru curățarea și dezinfectarea instrumentelor de toate tipurile, inclusiv a endoscoapelor. A nu se folosi pentru instrumente din aluminiu.

### Mod de utilizare

1. Innocid ID-i 71 Dezinfectant pentru instrumente **FINISH** este un dezinfectant gata de utilizare, care nu trebuie să fie diluat.
  2. Demontați instrumentele imediat după utilizare și introduceți-le în soluția pregătită de Innocid ID-i 71 Dezinfectant pentru instrumente **FINISH**.
  3. Evitați formarea unor bule sau a unor goluri pentru a păstra efectul dezinfectant al soluției.
  4. Lăsați instrumentele în soluție în funcție de timpul indicat de aplicare.
  5. După perioada de dezinfectare, scoateți instrumentele dezinfectate din soluție, clătiți-le și uscați-le bine.
- Schimbați soluția de dezinfectare conform gradului de murdărire al acesteia, cel puțin zilnic.

### Date chimice ale Innocid ID-i 71

**Conține:** glutaral  
**Valoare pH:** aprox. 6.5  
**Aspect/miros:** lichid limpede, de culoare bleu / cocos-vanilie

### Date microbiologice ale Innocid ID-i 71

Innocid ID-i 71 Dezinfectant pentru instrumente **FINISH** oferă un efect bactericid, fungicid, tuberculocid și virucid.


<b>Bacterii (incl. MRSA<sup>1</sup>)</b>	15 min.
<b>Fungi (C. albicans)</b>	15 min.
<b>TbB (M. Terraе)</b>	15 min.
<b>Virusuri</b>	15 min.

<sup>1</sup>Toate produsele dezinfectante **Innocid** acționează împotriva tuturor formelor de stafilococ auriu și vă protejează de MRSA (stafilococ auriu rezistent la metilicilină).



**Innocid ID-i 71 este disponibil  
în următoarele forme:**

<b>REF</b>	<b>Produs unic</b>
2222	5 litri

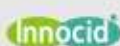

**Distribuitor:** SC Remix Com SRL, Adresa: Splaiul Unirii, nr. 16, camera 512B, sector 4, București; Tel/Fax: 021/243.40.47; E-mail: office@remixcom.ro  
**Producător:** Prisman GmbH, Werkstrasse 23, D-68519, Viernheim, Germania; E-mail: info@prisman.de